

IGIEN CLORO

Diaclor spray HOSPITAL

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

**DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY PRONTO ALL'USO,
ALCALINO CLORATTIVO SCHIUMOGENO.**

Indicato per l'igiene quotidiana di pareti e superfici:
arredi, piani di lavoro e attrezzature,
nel settore ospedaliero e nelle case di cura.



- ❑ PER DIACLOR SPRAY HOSPITAL FAIP HA PRESENTATO ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 528/2012 (BPR) IL DOSSIER PER I PRODOTTI BIOCIDI A BASE DI SODIO IPOCLORITO.
- ❑ PRODOTTO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE FORMULATO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'HACCP AI SENSI DEL REG CE 852/2004 DEL 29/4/2004 - IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E REG CE 853/2004 DEL 29/4/2004 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE.

MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

Spruzzare sulla superficie da trattare. Passare con panno o spugna pulita insistendo se in presenza di superfici ruvide/porose. Lasciare agire per 15 minuti, quindi effettuare un buon risciacquo.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ❑ ASPETTO | liquido, limpido |
| ❑ COLORE/ODORE | incolore, caratteristico |
| ❑ pH stq | 13,00 +/- 0,5 |
| ❑ PESO SPECIFICO, g/ml | 1,10 +/- 0,005 |
| ❑ BIODEGRADABILITÀ | conforme al Reg. CE 648/2004 |

AVVERTENZE

Non utilizzare su alluminio, zinco o ferro grezzo.

Conservare nel recipiente originale etichettato, in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.